



## 電極黏貼位置

EEG：根據10-20系統如圖a，EEG +貼於C3-A2，Reference貼於額前。(可因研究需求更改EEG及Reference位置)

EOG：貼於右眼角外上側1~2 cm處以及左眼角外下側1~2 cm處。左右顛倒亦可，但須保持左右眼位於眼角的對側 (即一上一下)。

EMG：貼於下巴兩側，盡量避開鬍鬚，並且貼於骨頭上 (訊號比較好)。

ECG：貼於左乳頭下方一掌處。

Temperature：貼於腋下。




## TD1A 操作五步驟


第一步驟：筆記型電腦接上 UBS 無線接收板，TD1A 插上記憶卡。




第二步驟：打開 Tel2.exe 軟體，open 打勾，出現 open com ok 訊息。

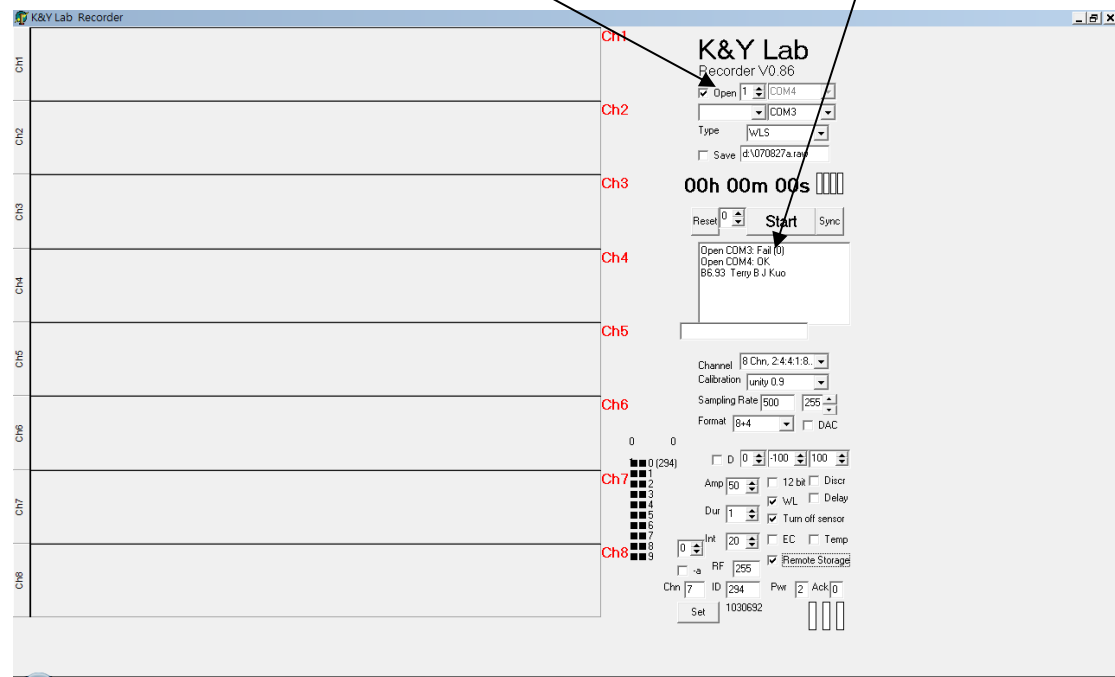

第三步驟：將檔案命名(建議用日期，如：071209a.raw，不得多於7個字元) 按 start，等數秒訊號即會出現，兩紅燈亦表紀錄正常。

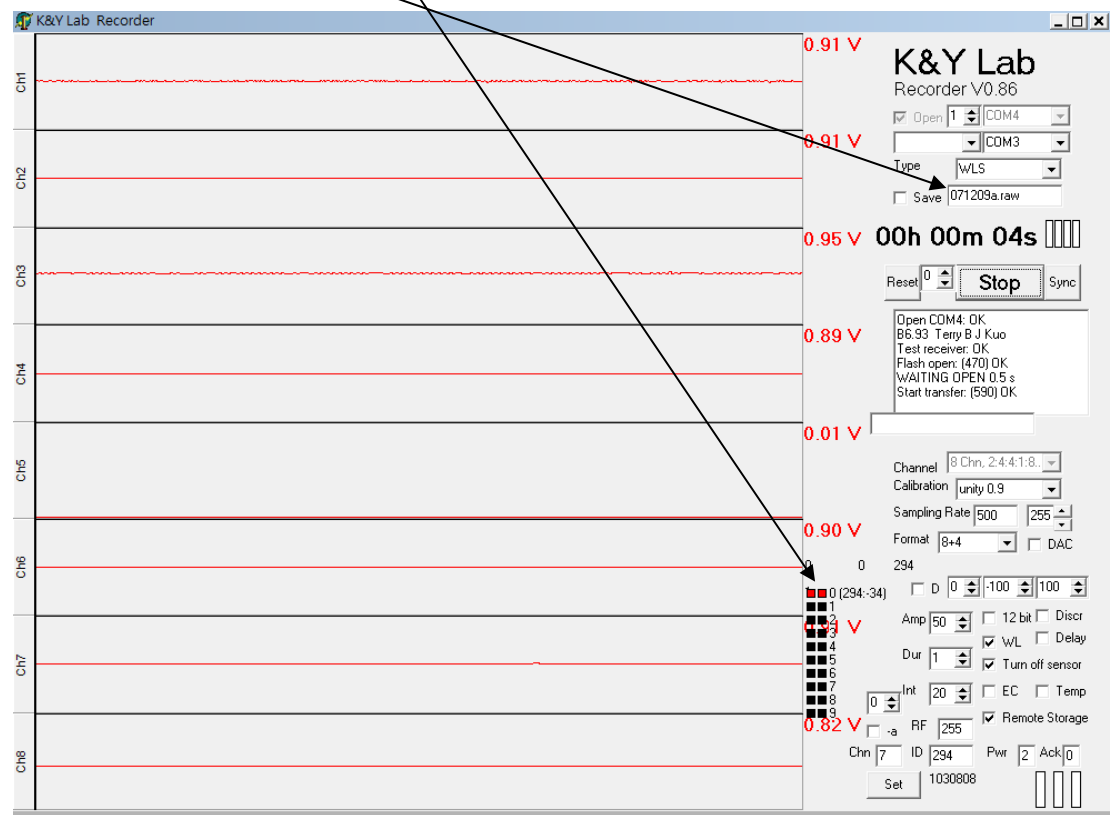

第四步驟：在指令方框鍵入 o 並按 enter(o 的小寫，表 off, 停止無線傳輸)，並按 x, 將此程式關閉，開始長時間單機紀錄。

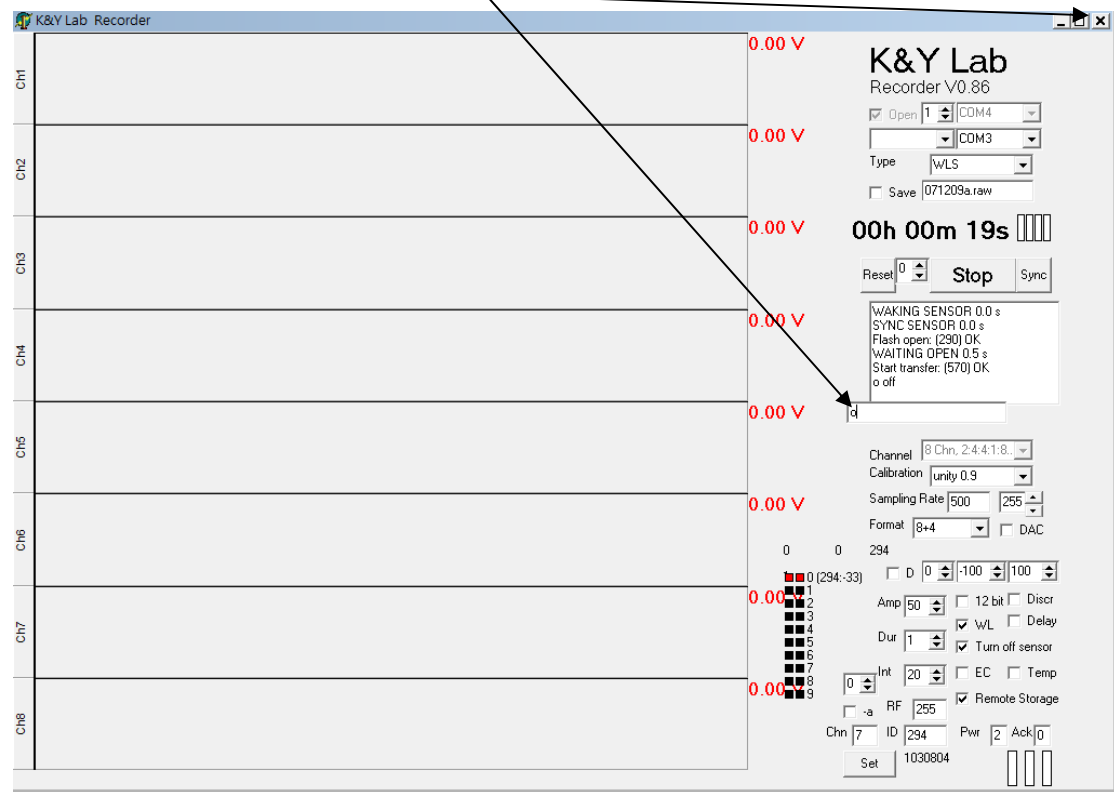

第五步驟：等時間到將結束，打開 Tel2.exe 軟體，open 打勾，出現 ok 訊息後按 start, 等訊號出現後，再按 stop 後即完成檢測。

