

教育部 100年度

教育部補助技專校院建立特色典範計畫

生命歷程至人關懷特色典範計畫

分項五之二 提升老人周全性照顧管理計畫

【開眼單足立測定器】

一、 檢測目的：

測量受測者於睜開眼睛時，感受身體動作變化及自行調整以維持平衡之能力。

二、 檢測方法：

1. 預備時，受測者睜眼雙腳站立，身體保持直立，雙手抱於胸前，雙眼平視於前方。
2. 聽到開始聲響時，非受測腳離開感應墊，保持睜眼單腳站立。
3. 當另一腳碰觸感應墊時，時間自動停止計算，或最大時間範圍到達，時間停止計算，感應一腳離開(單足站立)的時間。

三、 儀器操作流程：

1. 將開關打開，設定所需時間，設定好時間後按START 按鈕，即可完成時間設定。
2. RESET 按鈕為重新開始。
3. 靜音按鈕為動作時的靜音。
4. 手握把鈕為停止按鈕。
5. 結束後請將開關鈕關閉。



中臺科技大學

Central Taiwan University of Science and Technology